



**PUSH CARE**膝サポーター

はじめに  
Push care製品は、怪我や病気のために運動の自由が制限されたような場合に、効果的な解決法を提供します。

新製品の膝サポーターは、高レベルの性能と快適さ、高品質を特徴とするPush care製品です。このPush care膝サポーターは痛みを和らげると共に、調整可能な機能機器によってさらに多くの利点をもたらしてくれます。

革新性に富み、利用者ために細心の注意をもって作られています。このために、安全で何の間違いもなくお使いいただけます。

Push care膝サポーターをご使用になる前に、細心の注意を払って製品に関する説明を読み下し下さい。

販売店にお問い合わせくださいか、info@push.eu。

## 製品特徴

Push care膝サポーターは、膝関節の周りを圧縮することで、関節の安定性を改善します。

膝サポーターは両面で膝頭を支えます。圧縮と膝蓋支持の度合いは、必要に応じて調節が可能です。馬蹄形の膝蓋部分が膝蓋大腿関節の安定性を高め、痛みを和らげます。サポーターの上部のオープニングにより、サポーターは簡単に装着できるようになっています。解剖学的な適性とシリコンの裏張りによって、サポーターは歩行中もずれることはありません。

サポーターは高品質の快適な素材であるSympress™でできています。

マイクロファイバーが使用されているため、肌触りがソフトで、肌をドライに保ちます。Push care膝サポーターは使用が簡単で、クリーニングも問題なくできます。

## 適応症

- ・ 膝関節症
- ・ 漢蓋大腿関節症
- ・ 後縫合 痛痺
- ・ 膝蓋大腿痛症候群
- ・ 膝頭の不安定性
- ・ リウマチ性疼痛
- ・ 後遺症機能障害

サポーターを着用できないか、着用するべきではない既知の障害はありません。手足の循環悪化があると、サポーターの間に充血が生じることがあります。最初はサポーターをきつく締めすぎないようにしてください。

痛みを感じた場合は一つの警告であると考えください。痛みが持続するとか、症状が悪化する場合には、医師または理療法士による診断を受けてください。

## サイズの決定・装着

膝サポーターにはサイズが5つあります。上脚部では、下脚部に対して 90° の角度で開いています。それから、膝蓋部分の下側の部分の周囲を測定して下さい。バッジマー記載の表に、あなたの膝の間に合ったサポーターのサイズが示されています。

面ファスナーの止め具を緩めて、装着し易いようにして下さい。

A. 予め決まっている膝蓋部分が腰を包むくなる所まで、膝関節の上にサポーターを置いてください。面ファスナーの□及び○を締めて、サポーターを固定してください。

B. 上部に対して斜めにストラップ▢及び▢を締めて下さい。ストラップを緩めたり、締めたりしながら、最も快適になるように圧縮度を調整して下さい。

## ケアとメンテナンス

サポーターを清潔に保ち、寿命を最大に伸ばすには、指示を守って定期的にサポーターをクリーニングすることが重要です。しばらく使うつもりがない場合には、保管する前にサポーターを洗って乾燥させることをお勧めします。洗たくの前に、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。サポーターは、温湯洗濯のデリケート洗いコースまたは手洗濯することができます。どんな漂白剤も使わないでください。洗濯機のデリケート洗い用の乾燥コースは使っても差支えはありませんが、その後、サポーターを風通しのよい場所で（熱風の近くや回転式乾燥機以外）乾かしてください。

## 重要な事項

- ・ Pushサポーターを適切に使用するには、医師か理療法士による診断が必要となるかもしれません。
- ・ Pushサポーターは、無傷の膝の着用目的で設計されています。肌に傷がかかる場合には、サポーターを脱ぐ必要があります。
- ・ 最適な機能を発揮するには、適切な大きさを選択する必要があります。購入前にサポーターを試すことをおすすめします。購入後は、サポーターを脱ぐことがあります。
- ・ オプション機能を実現するには、サイズを適切に選択する必要があります。購入前にサポーターを脱ぐことをおすすめします。販売代理店の専門スタッフが、Pushサポーターを装着する最も適切な方法を説明します。この製品情報を、安全な場所に保管して、装着の仕方について必要なときにおいても参照できるようにしてください。
- ・ 製品に個別の調整が必要な場合には、サポーターの専門家に相談してください。
- ・ コンボネーショントや縫い目に摩耗や老化の兆候がないかどうか、使用前に毎回Pushサポーターをチェックしてください。Pushサポーターの最適なバフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合のみ保証されます。
- ・ 医療機器に関するEU規則2017/745の組み込みにあらわし、利用者は製品に連絡する重要な事項について製造業者および利用者の会社のある加盟国での管轄官庁に報告しなければなりません。

Push®は、オランダのNea International bvの登録商標です。

皆様の国の販売店について詳しい情報は、次のサイトをご覗ください。[www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

各店の販売店について詳しい情報は、次のサイトをご覗ください。[www.push.eu/distributors](http://www.push.eu/distributors)

各店の販売店について詳しい情報は、次のサイトをご覗