

PUSH MED肩サポーター

はじめに
運動器障害に痛みや損傷等がある場合、Push med製品のサポートはその患部に対する保護や治療に有効な働きをします。

新しいPush med製品としての肩サポーターは、機能性、快適性とその品質に優れた特徴があります。Push med shoulder brace（肩肩挟み）は、肩を適切に固定して、痛みを和らげます。着用して動作時の見えさは、機械的使用意図の良さを特徴としているからです。

Push med製品は革新性に富み、利用者のために細心の注意をもって作られています。最大の安全性と大きな運動の自由を提供します。利用者に満足していただけの製品となっている。ご使用頂く際には、製品の使用意図を注意深くお読み頂くをお願いいたします。ご質問がある場合は、販売店にお尋ねください。又は、www.push.eu (info@push.eu) にお問い合わせください。

製品の特徴

Push肩サポーターは3つの部分から出来ています。サポーターの基礎となるのは、胸または上腕の周りに巻かれている胸ストラップです。この胸ストラップはサイズが合致のため、一度だけ調整する必要はありません。胸ストラップは、肩を使わずに上腕を身体に固定します。肩サポーター位置は、腕を特定の位置に固定できるように設定できます。その位置は、胸ストラップを少し回すだけで簡単に変更することができます。3番目の固定点では、手首を楽に固定し、手を支えます。これにより関節は固定された手が垂れ下がります。外転制限の必要が必要な場合は、手の甲と手のサポートの両方を取り出すことができます。サポーターで身体の周りを締め付けても、首や腕にストレスがかかりません。個々の固定点とはそれぞれの調節により、状況に応じて最適な調整が可能です。

Push med肩サポーターは、普通に洗濯することができます。

適応症

- ・ 鎖骨骨折
- ・ (不完全) 脱臼後の治療
- ・ SC または AC 関節後の (不完全) 脱臼後の治療
- ・ 骨頭下上腕骨骨折
- ・ 上腕肩甲の間隙周囲炎
- ・ 術後治療
- ・ 弱い片側不全麻痺（夜間も）の場合の三角巾として

サポーターを着用できないか、着用するべきではない、既知の障害はありません。手足の血液循環が悪いと、サポーターによって血流が生じることがあります。最初サポーターをきつく締めすぎないようにしてください。

痛みを感じたりそれらは一つの警告であるとお考えください。痛みが持続すると、症状が悪化する場合には、医師または理学療法士による診断を受けてください。

装着・設定

肩サポーターは3つのサイズがあります。各サイズとも、左右両方の肩で使用するものと両肩で使用するものとがあります。胸のサイズは肩から下した下の位置からセーターの下のままをお読みください。胸囲に達したサポーターのサイズについては、パッケージに表示されている表をご覧ください。

正しい装着の順序は、面ファスナーの上で増えているフィッシャーが表示しています ([1](#)) ([2](#)) ([3](#)) ([4](#)) ([5](#)) ([6](#)) ([7](#)) ([8](#)) ([9](#)) ([10](#)) ([11](#)) ([12](#)) ([13](#)) ([14](#)) ([15](#)) ([16](#)) ([17](#)) ([18](#)) ([19](#)) ([20](#)) ([21](#)) ([22](#)) ([23](#)) ([24](#)) ([25](#)) ([26](#)) ([27](#)) ([28](#)) ([29](#)) ([30](#)) ([31](#)) ([32](#)) ([33](#)) ([34](#)) ([35](#)) ([36](#)) ([37](#)) ([38](#)) ([39](#)) ([40](#)) ([41](#)) ([42](#)) ([43](#)) ([44](#)) ([45](#)) ([46](#)) ([47](#)) ([48](#)) ([49](#)) ([50](#)) ([51](#)) ([52](#)) ([53](#)) ([54](#)) ([55](#)) ([56](#)) ([57](#)) ([58](#)) ([59](#)) ([60](#)) ([61](#)) ([62](#)) ([63](#)) ([64](#)) ([65](#)) ([66](#)) ([67](#)) ([68](#)) ([69](#)) ([70](#)) ([71](#)) ([72](#)) ([73](#)) ([74](#)) ([75](#)) ([76](#)) ([77](#)) ([78](#)) ([79](#)) ([80](#)) ([81](#)) ([82](#)) ([83](#)) ([84](#)) ([85](#)) ([86](#)) ([87](#)) ([88](#)) ([89](#)) ([90](#)) ([91](#)) ([92](#)) ([93](#)) ([94](#)) ([95](#)) ([96](#)) ([97](#)) ([98](#)) ([99](#)) ([100](#)) ([101](#)) ([102](#)) ([103](#)) ([104](#)) ([105](#)) ([106](#)) ([107](#)) ([108](#)) ([109](#)) ([110](#)) ([111](#)) ([112](#)) ([113](#)) ([114](#)) ([115](#)) ([116](#)) ([117](#)) ([118](#)) ([119](#)) ([120](#)) ([121](#)) ([122](#)) ([123](#)) ([124](#)) ([125](#)) ([126](#)) ([127](#)) ([128](#)) ([129](#)) ([130](#)) ([131](#)) ([132](#)) ([133](#)) ([134](#)) ([135](#)) ([136](#)) ([137](#)) ([138](#)) ([139](#)) ([140](#)) ([141](#)) ([142](#)) ([143](#)) ([144](#)) ([145](#)) ([146](#)) ([147](#)) ([148](#)) ([149](#)) ([150](#)) ([151](#)) ([152](#)) ([153](#)) ([154](#)) ([155](#)) ([156](#)) ([157](#)) ([158](#)) ([159](#)) ([160](#)) ([161](#)) ([162](#)) ([163](#)) ([164](#)) ([165](#)) ([166](#)) ([167](#)) ([168](#)) ([169](#)) ([170](#)) ([171](#)) ([172](#)) ([173](#)) ([174](#)) ([175](#)) ([176](#)) ([177](#)) ([178](#)) ([179](#)) ([180](#)) ([181](#)) ([182](#)) ([183](#)) ([184](#)) ([185](#)) ([186](#)) ([187](#)) ([188](#)) ([189](#)) ([190](#)) ([191](#)) ([192](#)) ([193](#)) ([194](#)) ([195](#)) ([196](#)) ([197](#)) ([198](#)) ([199](#)) ([200](#)) ([201](#)) ([202](#)) ([203](#)) ([204](#)) ([205](#)) ([206](#)) ([207](#)) ([208](#)) ([209](#)) ([210](#)) ([211](#)) ([212](#)) ([213](#)) ([214](#)) ([215](#)) ([216](#)) ([217](#)) ([218](#)) ([219](#)) ([220](#)) ([221](#)) ([222](#)) ([223](#)) ([224](#)) ([225](#)) ([226](#)) ([227](#)) ([228](#)) ([229](#)) ([230](#)) ([231](#)) ([232](#)) ([233](#)) ([234](#)) ([235](#)) ([236](#)) ([237](#)) ([238](#)) ([239](#)) ([240](#)) ([241](#)) ([242](#)) ([243](#)) ([244](#)) ([245](#)) ([246](#)) ([247](#)) ([248](#)) ([249](#)) ([250](#)) ([251](#)) ([252](#)) ([253](#)) ([254](#)) ([255](#)) ([256](#)) ([257](#)) ([258](#)) ([259](#)) ([260](#)) ([261](#)) ([262](#)) ([263](#)) ([264](#)) ([265](#)) ([266](#)) ([267](#)) ([268](#)) ([269](#)) ([270](#)) ([271](#)) ([272](#)) ([273](#)) ([274](#)) ([275](#)) ([276](#)) ([277](#)) ([278](#)) ([279](#)) ([280](#)) ([281](#)) ([282](#)) ([283](#)) ([284](#)) ([285](#)) ([286](#)) ([287](#)) ([288](#)) ([289](#)) ([290](#)) ([291](#)) ([292](#)) ([293](#)) ([294](#)) ([295](#)) ([296](#)) ([297](#)) ([298](#)) ([299](#)) ([300](#)) ([301](#)) ([302](#)) ([303](#)) ([304](#)) ([305](#)) ([306](#)) ([307](#)) ([308](#)) ([309](#)) ([310](#)) ([311](#)) ([312](#)) ([313](#)) ([314](#)) ([315](#)) ([316](#)) ([317](#)) ([318](#)) ([319](#)) ([320](#)) ([321](#)) ([322](#)) ([323](#)) ([324](#)) ([325](#)) ([326](#)) ([327](#)) ([328](#)) ([329](#)) ([330](#)) ([331](#)) ([332](#)) ([333](#)) ([334](#)) ([335](#)) ([336](#)) ([337](#)) ([338](#)) ([339](#)) ([340](#)) ([341](#)) ([342](#)) ([343](#)) ([344](#)) ([345](#)) ([346](#)) ([347](#)) ([348](#)) ([349](#)) ([350](#)) ([351](#)) ([352](#)) ([353](#)) ([354](#)) ([355](#)) ([356](#)) ([357](#)) ([358](#)) ([359](#)) ([360](#)) ([361](#)) ([362](#)) ([363](#)) ([364](#)) ([365](#)) ([366](#)) ([367](#)) ([368](#)) ([369](#)) ([370](#)) ([371](#)) ([372](#)) ([373](#)) ([374](#)) ([375](#)) ([376](#)) ([377](#)) ([378](#)) ([379](#)) ([380](#)) ([381](#)) ([382](#)) ([383](#)) ([384](#)) ([385](#)) ([386](#)) ([387](#)) ([388](#)) ([389](#)) ([390](#)) ([391](#)) ([392](#)) ([393](#)) ([394](#)) ([395](#)) ([396](#)) ([397](#)) ([398](#)) ([399](#)) ([400](#)) ([401](#)) ([402](#)) ([403](#)) ([404](#)) ([405](#)) ([406](#)) ([407](#)) ([408](#)) ([409](#)) ([410](#)) ([411](#)) ([412](#)) ([413](#)) ([414](#)) ([415](#)) ([416](#)) ([417](#)) ([418](#)) ([419](#)) ([420](#)) ([421](#)) ([422](#)) ([423](#)) ([424](#)) ([425](#)) ([426](#)) ([427](#)) ([428](#)) ([429](#)) ([430](#)) ([431](#)) ([432](#)) ([433](#)) ([434](#)) ([435](#)) ([436](#)) ([437](#)) ([438](#)) ([439](#)) ([440](#)) ([441](#)) ([442](#)) ([443](#)) ([444](#)) ([445](#)) ([446](#)) ([447](#)) ([448](#)) ([449](#)) ([450](#)) ([451](#)) ([452](#)) ([453](#)) ([454](#)) ([455](#)) ([456](#)) ([457](#)) ([458](#)) ([459](#)) ([460](#)) ([461](#)) ([462](#)) ([463](#)) ([464](#)) ([465](#)) ([466](#)) ([467](#)) ([468](#)) ([469](#)) ([470](#)) ([471](#)) ([472](#)) ([473](#)) ([474](#)) ([475](#)) ([476](#)) ([477](#)) ([478](#)) ([479](#)) ([480](#)) ([481](#)) ([482](#)) ([483](#)) ([484](#)) ([485](#)) ([486](#)) ([487](#)) ([488](#)) ([489](#)) ([490](#)) ([491](#)) ([492](#)) ([493](#)) ([494](#)) ([495](#)) ([496](#)) ([497](#)) ([498](#)) ([499](#)) ([500](#)) ([501](#)) ([502](#)) ([503](#)) ([504](#)) ([505](#)) ([506](#)) ([507](#)) ([508](#)) ([509](#)) ([510](#)) ([511](#)) ([512](#)) ([513](#)) ([514](#)) ([515](#)) ([516](#)) ([517](#)) ([518](#)) ([519](#)) ([520](#)) ([521](#)) ([522](#)) ([523](#)) ([524](#)) ([525](#)) ([526](#)) ([527](#)) ([528](#)) ([529](#)) ([530](#)) ([531](#)) ([532](#)) ([533](#)) ([534](#)) ([535](#)) ([536](#)) ([537](#)) ([538](#)) ([539](#)) ([540](#)) ([541](#)) ([542](#)) ([543](#)) ([544](#)) ([545](#)) ([546](#)) ([547](#)) ([548](#)) ([549](#)) ([550](#)) ([551](#)) ([552](#)) ([553](#)) ([554](#)) ([555](#)) ([556](#)) ([557](#)) ([558](#)) ([559](#)) ([560](#)) ([561](#)) ([562](#)) ([563](#)) ([564](#)) ([565](#)) ([566](#)) ([567](#)) ([568](#)) ([569](#)) ([570](#)) ([571](#)) ([572](#)) ([573](#)) ([574](#)) ([575](#)) ([576](#)) ([577](#)) ([578](#)) ([579](#)) ([580](#)) ([581](#)) ([582](#)) ([583](#)) ([584](#)) ([585](#)) ([586](#)) ([587](#)) ([588](#)) ([589](#)) ([590](#)) ([591](#)) ([592](#)) ([593](#)) ([594](#)) ([595](#)) ([596](#)) ([597](#)) ([598](#)) ([599](#)) ([600](#)) ([601](#)) ([602](#)) ([603](#)) ([604](#)) ([605](#)) ([606](#)) ([607](#)) ([608](#)) ([609](#)) ([610](#)) ([611](#)) ([612](#)) ([613](#)) ([614](#)) ([615](#)) ([616](#)) ([617](#)) ([618](#)) ([619](#)) ([620](#)) ([621](#)) ([622](#)) ([623](#)) ([624](#)) ([625](#)) ([626](#)) ([627](#)) ([628](#)) ([629](#)) ([630](#)) ([631](#)) ([632](#)) ([633](#)) ([634](#)) ([635](#)) ([636](#)) ([637](#)) ([638](#)) ([639](#)) ([640](#)) ([641](#)) ([642](#)) ([643](#)) ([644](#)) ([645](#)) ([646](#)) ([647](#)) ([648](#)) ([649](#)) ([650](#)) ([651](#)) ([652](#)) ([653](#)) ([654](#)) ([655](#)) ([656](#)) ([657](#)) ([658](#)) ([659](#)) ([660](#)) ([661](#)) ([662](#)) ([663](#)) ([664](#)) ([665](#)) ([666](#)) ([667](#)) ([668](#)) ([669](#)) ([670](#)) ([671](#)) ([672](#)) ([673](#)) ([674](#)) ([675](#)) ([676](#)) ([677](#)) ([678](#)) ([679](#)) ([680](#)) ([681](#)) ([682](#)) ([683](#)) ([684](#)) ([685](#)) ([686](#)) ([687](#)) ([688](#)) ([689](#)) ([690](#)) ([691](#)) ([692](#)) ([693](#)) ([694](#)) ([695](#)) ([696](#)) ([697](#)) ([698](#)) ([699](#)) ([700](#)) ([701](#)) ([702](#)) ([703](#)) ([704](#)) ([705](#)) ([706](#)) ([707](#)) ([708](#)) ([709](#)) ([710](#)) ([711](#)) ([712](#)) ([713](#)) ([714](#)) ([715](#)) ([716](#)) ([717](#)) ([718](#)) ([719](#)) ([720](#)) ([721](#)) ([722](#)) ([723](#)) ([724](#)) ([725](#)) ([726](#)) ([727](#)) ([728](#)) ([729](#)) ([730](#)) ([731](#)) ([732](#)) ([733](#)) ([734](#)) ([735](#)) ([736](#)) ([737](#)) ([738](#)) ([739](#)) ([740](#)) ([741](#)) ([742](#)) ([743](#)) ([744](#)) ([745](#)) ([746](#)) ([747](#)) ([748](#)) ([749](#)) ([750](#)) ([751](#)) ([752](#)) ([753](#)) ([754](#)) ([755](#)) ([756](#)) ([757](#)) ([758](#)) ([759](#)) ([760](#)) ([761](#)) ([762](#)) ([763](#)) ([764](#)) ([765](#)) ([766](#)) ([767](#)) ([768](#)) ([769](#)) ([770](#)) ([771](#)) ([772](#)) ([773](#)) ([774](#)) ([775](#)) ([776](#)) ([777](#)) ([778](#)) ([779](#)) ([780](#)) ([781](#)) ([782](#)) ([783](#)) ([784](#)) ([785](#)) ([786](#)) ([787](#)) ([788](#)) ([789](#)) ([790](#)) ([791](#)) ([792](#)) ([793](#)) ([794](#)) ([795](#)) ([796](#)) ([797](#)) ([798](#)) ([799](#)) ([800](#)) ([801](#)) ([802](#)) ([803](#)) ([804](#)) ([805](#)) ([806](#)) ([807](#)) ([808](#)) ([809](#)) ([810](#)) ([811](#)) ([812](#)) ([813](#)) ([814](#)) ([815](#)) ([816](#)) ([817](#)) ([818](#)) ([819](#)) ([820](#)) ([821](#)) ([822](#)) ([823](#)) ([824](#)) ([825](#)) ([826](#)) ([827](#)) ([828](#)) ([829](#)) ([830](#)) ([831](#)) ([832](#)) ([833](#)) ([834](#)) ([835](#)) ([836](#)) ([837](#)) ([838](#)) ([839](#)) ([840](#)) ([841](#)) ([842](#)) ([843](#)) ([844](#)) ([845](#)) ([846](#)) ([847](#)) ([848](#)) ([849](#)) ([850](#)) ([851](#)) ([852](#)) ([853](#)) ([854](#)) ([855](#)) ([856](#)) ([857](#)) ([858](#)) ([859](#)) ([860](#)) ([861](#)) ([862](#)) ([863](#)) ([864](#)) ([865](#)) ([866](#)) ([867](#)) ([868](#)) ([869](#)) ([870](#)) ([871](#)) ([872](#)) ([873](#)) ([874](#)) ([875](#)) ([876](#)) ([877](#)) ([878](#)) ([879](#)) ([880](#)) ([881](#)) ([882](#)) ([883](#)) ([884](#)) ([885](#)) ([886](#)) ([887](#)) ([888](#)) ([889](#)) ([890](#)) ([891](#)) ([892](#)) ([893](#)) ([894](#)) ([895](#)) ([896](#)) ([897](#)) ([898](#)) ([899](#)) ([900](#)) ([901](#)) ([902](#)) ([903](#)) ([904](#)) ([905](#)) ([906](#)) ([907](#)) ([908](#)) ([909](#)) ([910](#)) ([911](#)) ([912](#)) ([913](#)) ([914](#)) ([915](#)) ([916](#)) ([917](#)) ([918](#)) ([919](#)) ([920](#)) ([921](#)) ([922](#)) ([923](#)) ([924](#)) ([925](#)) ([926](#)) ([927](#)) ([928](#)) ([929](#)) ([930](#)) ([931](#)) ([932](#)) ([933](#)) ([934](#)) ([935](#)) ([936](#)) ([937](#)) ([938](#)) ([939](#)) ([940](#)) ([941](#)) ([942](#)) ([943](#)) ([944](#)) ([945](#)) ([946](#)) ([947](#)) ([948](#)) ([949](#)) ([950](#)) ([951](#)) ([952](#)) ([953](#)) ([954](#)) ([955](#)) ([956](#)) ([957](#)) ([958](#)) ([959](#)) ([960](#)) ([961](#)) ([962](#)) ([963](#)) ([964](#)) ([965](#)) ([966](#)) ([967](#)) ([968](#)) ([969](#)) ([970](#)) ([971](#)) ([972](#)) ([973](#)) ([974](#)) ([975](#)) ([976](#)) ([977](#)) ([978](#)) ([979](#)) ([980](#)) ([981](#)) ([982](#)) ([983](#)) ([984](#)) ([985](#)) ([986](#)) ([987](#)) ([988](#)) ([989](#)) ([990](#)) ([991](#)) ([992](#)) ([993](#)) ([994](#)) ([995](#)) ([996](#)) ([997](#)) ([998](#)) ([999](#)) ([1000](#)) ([1001](#)) ([1002](#)) ([1003](#)) ([1004](#)) ([1005](#)) ([1006](#)) ([1007](#)) ([1008](#)) ([1009](#)) ([1010](#)) ([1011](#)) ([1012](#)) ([1013](#)) ([1014](#)) ([1015](#)) ([1016](#)) ([1017](#)) ([1018](#)) ([1019](#)) ([1020](#)) ([1021](#)) ([1022](#)) ([1023](#)) ([1024](#)) ([1025](#)) ([1026](#)) ([1027](#)) ([1028](#)) ([1029](#)) ([1030](#)) ([1031](#)) ([1032](#)) ([1033](#)) ([1034](#)) ([1035](#)) ([1036](#)) ([1037](#)) ([1038](#)) ([1039](#)) ([1040](#)) ([1041](#)) ([1042](#)) ([1043](#)) ([1044](#)) ([1045](#)) ([1046](#)) ([1047](#)) ([1048](#)) ([1049](#)) ([1050](#)) ([1051](#)) ([1052](#)) ([1053](#)) ([1054](#)) ([1055](#)) ([1056](#)) ([1057](#)) ([1058](#)) ([1059](#)) ([1060](#)) ([1061](#)) ([1062](#)) ([1063](#)) ([1064](#)) ([1065](#)) ([1066](#)) ([1067](#)) ([1068](#)) ([1069](#)) ([1070](#)) ([1071](#)) ([1072](#)) ([1073](#)) ([1074](#)) ([1075](#)) ([1076](#)) ([1077](#)) ([1078](#)) ([1079](#)) ([1080](#)) ([1081](#)) ([1082](#)) ([1083](#)) ([1084](#)) ([1085](#)) ([1086](#)) ([1087](#)) ([1088](#)) ([1089](#)) ([1090](#)) ([1091](#)) ([1092](#)) ([1093](#)) ([1094](#)) ([1095](#)) ([1096](#)) ([1097](#)) ([1098](#)) ([1099](#)) ([1100](#)) ([1101](#)) ([1102](#)) ([1103](#)) ([1104](#)) ([1105](#)) ([1106](#)) ([1107](#)) ([1108](#)) ([1109](#)) ([1110](#)) ([1111](#)) ([1112](#)) ([1113](#)) ([11](#)