

Come funziona il tutore per piede FP?

Per consentire lo scarico della fascia plantare, viene applicata innanzitutto una fascia di ancoraggio intorno all'avampiede. Questa fascia è progettata per rimanere in posizione e assorbire le forze di trazione dei due bendaggi funzionali.

Successivamente i bendaggi funzionali vengono posizionati intorno al tallone, tramite un rinforzo.

Incrociando i bendaggi funzionali e fissandoli con una leggera tensione alla fascia di ancoraggio, viene creata una struttura stabile. Quest'ultima scarica la fascia plantare quando il piede è sotto carico.

Questo tutore particolarmente sottile, leggero e resistente allevia il dolore nell'arco dell'intera giornata e può essere indossato con o senza calzature.



Push[®] med Tutore per il piede FP

Un nuovo approccio
al trattamento della
fascite plantare



Push for
freedom

[push.eu](https://push.braces.eu)

9184 - 02/25



Un’innovazione nel trattamento della fascite plantare.

Questo innovativo tutore riduce la tensione sulla fascia plantare quando il piede è sotto carico. È progettato per alleviare il dolore quando si sta in piedi e quando si cammina.

Il tutore medico per piede FP Push Med si basa su una tecnica di taping sviluppata dal medico sportivo belga Filip Parmentier, dimostratasi particolarmente efficace nella pratica. Collegando il tallone e l’avampiede tramite un resistente bendaggio funzionale, la tensione sulla fascia plantare mentre si cammina e si sta in piedi viene ridotta. Questo consente di scaricare la fascia plantare senza applicare pressione alla pianta del piede.

La tensione sull’inserzione della fascia al calcagno viene ridotta, dando all’infiammazione il tempo di guarire.



Muoviti in libertà e senza dolore per tutta la giornata, con o senza scarpe.

I pazienti possono continuare le loro attività quotidiane, incluso lo sport, mantenendo la propria libertà funzionale. A prescindere dal fatto di indossare calzature di qualunque tipo, il tutore viene calzato direttamente sul piede, quindi fornisce sostegno dalle prime ore del mattino fino a tarda notte.

Il tutore per piede FP Push allevia il dolore nell’arco della giornata senza interferire con le proprie attività e la scelta delle calzature.

Allevia la pressione sulla fascia plantare in caso di fascite plantare e tallonite.

Il tutore per piede FP Push riduce la pressione sulla fascia lungo l’arco plantare in caso di dolore dovuto a fascite plantare e tallonite. Questo tutore può essere utilizzato per disturbi acuti e cronici. Questo dispositivo è destinato agli adulti per l’uso quotidiano e può essere indossato con o senza calzature. Gli utenti possono regolare il tutore autonomamente per ottenere la massima efficacia e il massimo comfort.

Indicazioni:

- Fascite plantare
- Tallonite plantare

Controindicazioni

Alcune condizioni mediche possono venire influenzate negativamente a causa della compressione o della pressione locale, aggravando potenzialmente i disturbi. Per maggiori dettagli consultare le istruzioni per l’uso.

